


3M™ Primacast™ Schiene

schnell und leicht

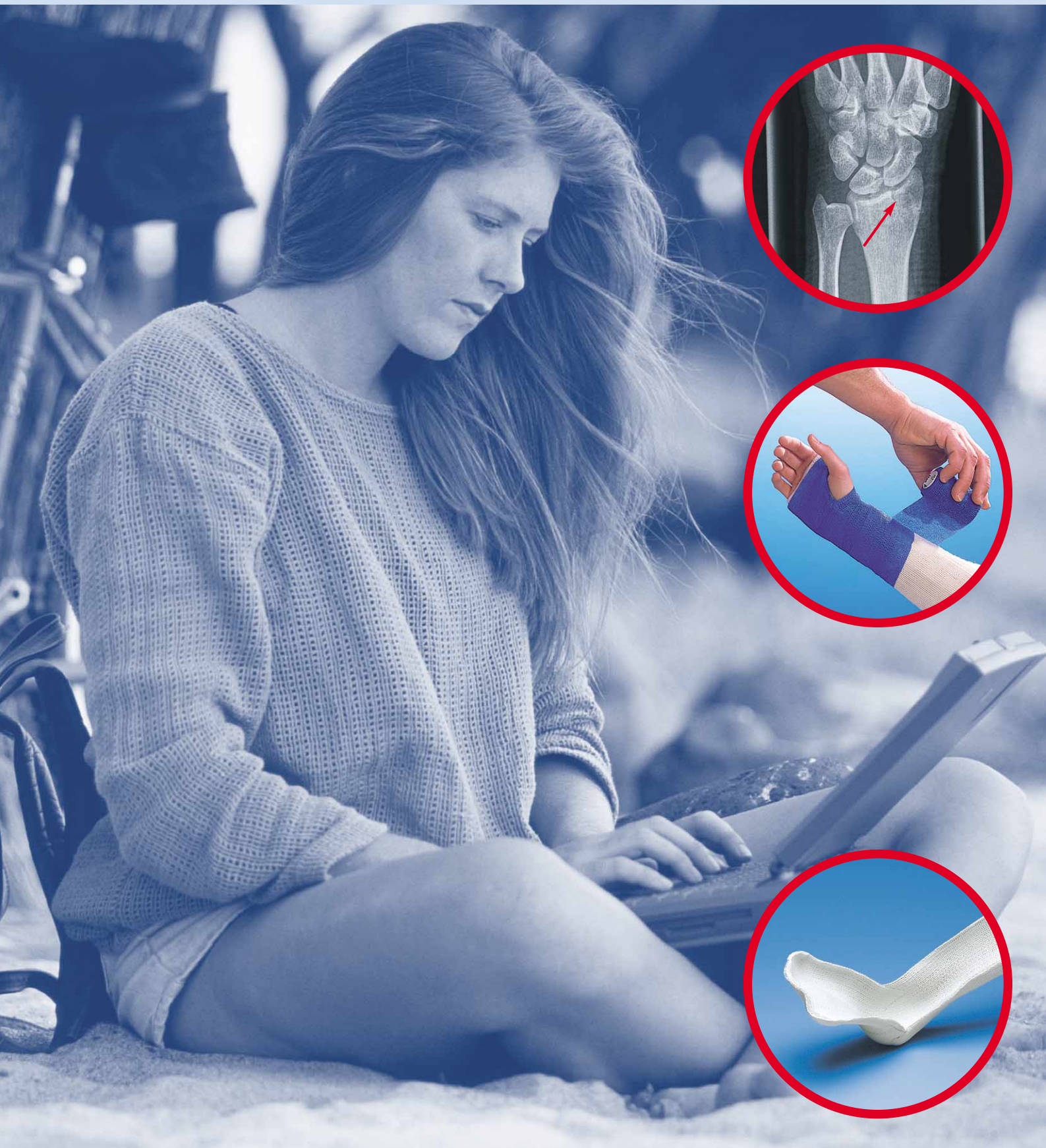

3M™ Primacast™ Schiene

Das Beste aus zwei Immobilisations-Systemen

Die Schnelligkeit und Stabilität von Synthetikmaterial

Die Modellierbarkeit und das "feeling" von Weißgips

Die Röntgentransparenz von ... 3M Primacast



Jetzt in einem einzigartigen Schienenmaterial

Sie als professionelle/r Anwender/in kennen die Vorteile aber auch die Kompromisse, die Sie bei der Arbeit mit Weißgips und synthetischem Material machen müssen. Die neue Primacast Schiene vereint alle Vorteile beider Systeme – ohne Kompromisse!

Stabilität und schnelle Aushärtung

- 3M Primacast bietet die hohe Stabilität einer Synthetikschiene
- Das Harz bindet in 3 bis 4 Minuten ab
- Funktionelle Stabilität schon nach 20 Minuten – Weißgips härtet bis zu 48 Stunden aus
- Schneller Schutz durch kurze Aushärtungszeit
- Stabil und haltbar

Anschmiegsam wie Weißgips

- Einfaches Anmodellieren
- Körperkonturen lassen sich besser ertasten als bei herkömmlichen Kunststoffschienen
- Extrem leicht und dünn durch spezielle Lagenkonstruktion



Einzigartige Röntgentransparenz

- Die Durchlässigkeit von Röntgenstrahlen ist weitaus höher als bei anderen synthetischen Schienen (mittlere Abb.) und als bei Weißgips (rechte Abb.).
- 3M Primacast Schienen müssen für eine Kontrollaufnahme nicht abgenommen werden. Eine Erhöhung der Strahlendosis ist nicht notwendig, die normale Hautdosis ist ausreichend.

3M Primacast Schiene



Herkömmliche synthetische Schiene



Weißgips



Die Fraktur befindet sich am distalen Radius und erstreckt sich in das radiokarpale Gelenk. Alle Röntgenaufnahmen wurden mit 47 kv gemacht.

Einfache und saubere Anwendung

- Kein Staub und weniger Schmutz als bei Weißgipsschienen bedeuten weniger Reinigungsaufwand, ideal vor allem im OP
- 16 Lagen Material machen das Falten und Verstärken überflüssig
- Praxisgerechte Abmessungen: 6 Breiten, 6 Längen
- Vorgeschnitten für leichtes und schnelles Arbeiten: kein Verschließen, weniger Abfall
- Einzelverpackung erleichtert Lagerung und Transport im Hause – überall einsetzbar

Excellenter Patientenkomfort

- Kurze Abbindezeit für schnelle Unterstützung und Schutz des Patienten
- Geringes Gewicht für erhöhte Mobilität
- Kann bei der Röntgenkontrolle angelegt bleiben

Ungepolstert

Die ungepolsterte 3M Primacast Schiene – die erste "high-performance"-Schiene für höchste Patientenzufriedenheit.

Vergleichen Sie die 3M™ Primacast™ Schiene mit Ihrer bisherigen Methode

	3M Primacast Schiene	Herkömmliche synthetische Schiene	Weißgipsschiene
Hohe Anschmiegsamkeit	✓	-	✓
Konturen lassen sich ertasten	✓	-	✓
Hohe Stabilität	✓	✓	-
Funktionelle Stabilität in 20 min.	✓	✓	-
Klare Röntgenbilder	✓	-	-
Leicht	✓	✓	-
Saubere Anwendung	✓	✓	-
Dünn	✓	-	-
Vorgeschnitten	✓	✓	-
11 unterschiedliche Abmessungen	✓	✓	-



3M™ Primacast™ Schiene

schnell und leicht




Bestellinformationen

Ungepolsterte Schienen

Best.-Nr.	Abmessungen	Inhalt (Schiene pro Packung)	PZN ¹
30210	5,1 cm x 25,4 cm	15	0666012
30312	7,6 cm x 30,5 cm	15	0666199
30335	7,6 cm x 88,9 cm	15	0666207
30415	10,1 cm x 38,0 cm	15	0666213
30430	10,1 cm x 76,2 cm	15	0666236
30530	12,7 cm x 76,2 cm	10	0666242
30545	12,7 cm x 114,3 cm	10	0666259
30630	15,2 cm x 76,2 cm	10	0666265
30645	15,2 cm x 114,3 cm	10	0666271
30830	20,3 cm x 76,2 cm	10	0666288
30845	20,3 cm x 114,3 cm	10	0666294

Anwendungshinweise

- Polster anlegen
- Einmal-Handschuhe anziehen
- Schiene aus der Verpackung nehmen
- Blaues Papier entfernen (nicht wegwerfen)
- Schiene anpassen: evtl. ausfächern und zurechtschneiden (Papier kann als Unterlage verwendet werden)
- Schiene in kaltes Wasser tauchen und unter Wasser intensiv durchtränken und kneten!!
- Gut auswringen und anlegen
- Anwickeln (Mull oder elastische Binde) und anmodellieren
- Formfest innerhalb weniger Minuten
- Volle Belastbarkeit nach 20 Minuten!!

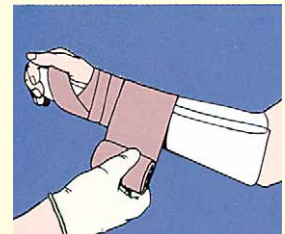

Weitere Informationen zu den 3M Immobilisationsprodukten finden Sie auf unserer Internet-Seite: www.3M.com.

¹: Nur in Deutschland



3M Medica

Zweigniederlassung der 3M
Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11
41460 Neuss
Telefon 02131 / 14 4000

3M Österreich GmbH

Abt. Medizin
Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel : 01 / 866 86 464
Fax: 01 / 866 86 330
e-mail: medizin-at@mmm.com



3M und Primacast sind Warenzeichen der Firma 3M
© 3M 2001

4341412

EF 319 1001 55